

Reinigung von RotoBed®Free in einem Waschsystem

RotoBed®Free ist gemäß der Norm IPX6W (Wasserbewertung) zugelassen und in einem Waschsystem waschbar. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um eine Beschädigung des Bettes zu vermeiden:

- Ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie alle Stoffe (einschließlich Matratze und Bezüge) sowie alle Holzteile.
- Alle Steckverbindungen müssen mit einer Steckerabdeckung abgedichtet werden.
- Alle Stecker und Steckerabdeckungen müssen mit Sperrungen ausgestattet sein (siehe Abschnitt 5.12 im RotoBed®Free Bedienungsanleitung), damit kein Wasser in die Motoren eindringen kann.
- Fahren Sie alle Motoren vollständig nach unten / innen (damit keine Motorarme herausragen), um Kalk- und Rostbildung zu vermeiden.
- Die elektrischen Teile des Bettes und die mechanischen Funktionen müssen vor der erneuten Verwendung des Bettes geprüft werden.

NB: Die mitgelieferte Standard Räder für ein RotoBed®Free-Pflegebett wurde nicht für die Reinigung in Waschsystemen getestet. Sofern die Räder nicht vor dem Waschen entfernt werden, sollte eine kürzere Lebensdauer die Räder berechnet werden. Alternativ können spezielle Räder erworben werden, die für ein Waschsystem getestet wurden.

RotoBed® weist darauf hin, dass das Waschen in Maschinen dazu führt, dass das Bett mit der Zeit schneller altert.