



Installieren des Fußteils, wenn die Achse mit den Nylonrädern herausgefallen ist

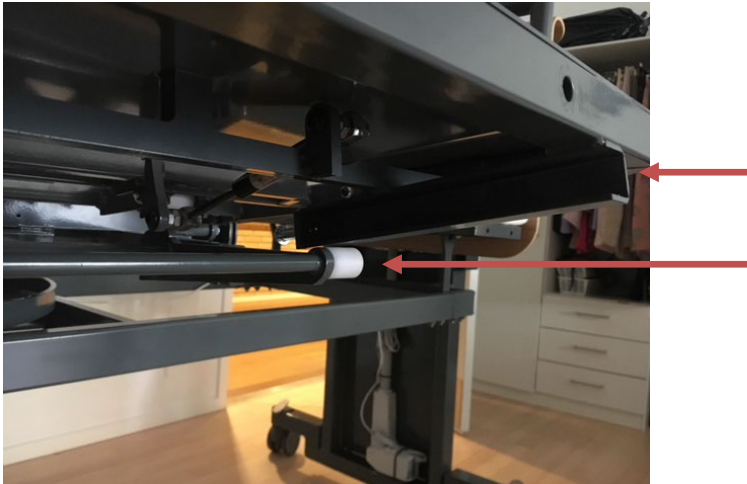

U-Profil. wo das Rad läuft

Nylon Rad

Wenn die 2 Nylonräder aus dem U-Profil gefallen sind, läuft das Beinteil nicht

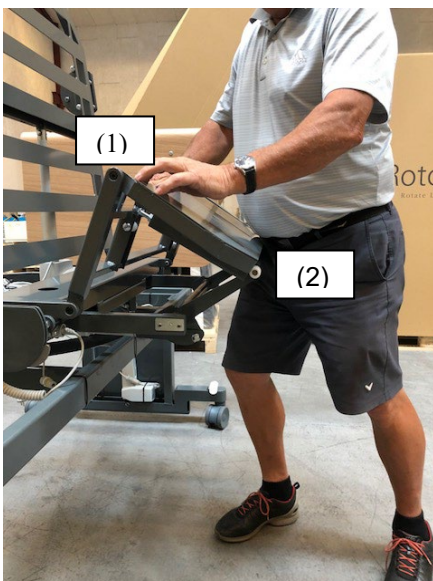

Beginnen Sie, das Bett in der Höhe in eine bequeme Position zu bringen und anzuheben (1).

Und schieben Sie die Rückenlehne mit der Hüfte (2)

Setzen Sie die Achse mit den Nylonrädern im U-Profil zurück, legen Sie Ihre Hände an die Seite des Fußteils und schieben Sie es vorsichtig nach unten - von der Rückenlehne weg, bis es in Position ist (3).

NB! Achte auf deine Finger und Hände, dass sie nicht eingeklemmt werden. Die Gasdruckfeder auf jeder Seite ist ziemlich stark

RotoBed®