

Austausch des Bein-Motors

Demontage eines defekten Bein-Motors – Das Bett muß in flach Liegepositon sein:



Kabelsicherung entfernen und Kabel aus dem Bein-Motor herausziehen, um eine Kabelbeschädigung zu vermeiden.


Zunächst den Sicherungsclip am Fussende entfernen und Bolzen herausziehen. Anschliessend den Sicherungsclip am motorseitigen Ende entfernen und den Bolzen herausziehen.

Vorbereitung eines neuen Bein-Motors:



Gabelkopf am defekten Bein-Motor demontieren und am neuen Bein-Motor befestigen.

Montage des neuen Bein-Motors – Das Bett muß in flach Liegeposition sein:

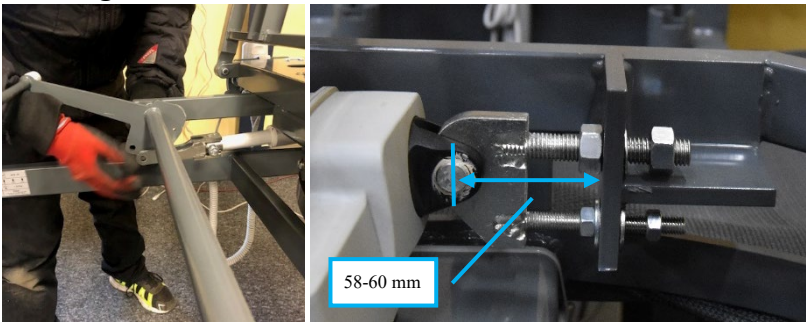

Zunächst den neuen Bein-Motor am motorseitigen Ende im Bett montieren und sodann an der Heberwelle fixieren. An der Motorhalterung müssen die Muttern glockert werden und die motorseitigen Muttern müssen gemäss Bild eingestellt werden.



Jetzt das Beinteil anheben und darauf achten, dass der Motor nicht überlastet und andererseits die Hebewelle maximal angehoben wird. Anschliessend die Einstellung in der „Stuhlstellung“ wiederholen, wobei in jedem Fall die Muttern von Hand gedreht werden.



Erneut das Bett in beiden Positionen testen, und schliesslich die Muttern mit einem Werkzeug anziehen



Reset von der Bettsteuerung

Bett in die tiefste Stellung bringen, Rückenlehne unten und Beinteil angehoben. Jetzt beide Tasten (Beineil) gleichzeitig drücken bis der Signalton 4 mal zu hören war.

RotoBed®