
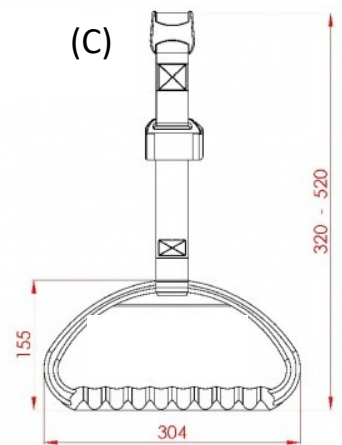
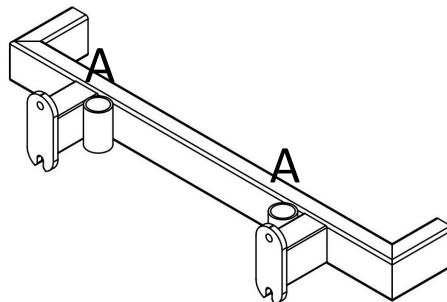



## Gebrauchsanweisung Patientenaufrichter

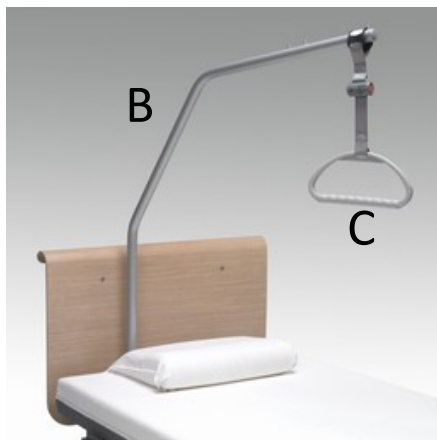

An der Kopfseite des Liegeflächenrahmens befindet sich die Aufnahme (A) für den Patientenaufrichter (B). Setzen Sie den Patientenaufrichter von oben in seine Aufnahme (rechte- oder linke Seite). Er wird von einem Bolzen in seiner Höhenposition gehalten. Drehen Sie den Patientenaufrichter so, dass der Bolzen in einer der Kerben der Aufnahme liegt. Längs- oder Querrichtung ist möglich. Hängen Sie den Haltegriff (C) mit dem Gurt zwischen den Haken an den Patientenaufrichter.

**Vorsicht!** Haltegriff und Gurt bestehen aus hochwertigem Kunststoff. Alle Kunststoffe sind aber nur bedingt alterungsbeständig, so dass Haltegriff oder Gurt nach langem Gebrauch brechen oder reißen können. Das kann Verletzungen verursachen. Erneuern Sie Haltegriff und Gurt nach spätestens 4–5 Jahren. Das Fertigungsjahr ist auf dem Produkt eingepreßt.

**Vorsicht!** Haltegriff und Gurt können bei hoher Belastung brechen oder reißen und dabei Verletzungen verursachen. Setzen Sie einen Patientenaufrichter nur ein, wenn er mit maximal 750 N (ca. 75 kg) belastet wird.

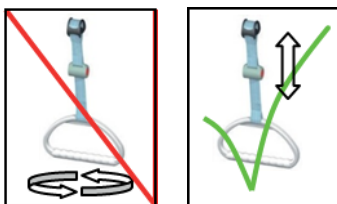

### **Vorsicht!**

Der Griff darf nicht im aufgehängten Zustand vielfach ( 180 °) inkl. Gurtband um die Vertikalachse gedreht werden (Wringen). Dieses kann zu einer Beschädigung der Aufrollautomatik führen.