

Rotobed Erweiterung®

Rotobed® Drehbetten können auf drei Arten in zwei Längen verlängert werden:

1. Verlängerung der Hauptmatratze + 10 cm.
2. Verlängerung der Fußmatratze + 10 cm.
3. Verlängerung der Hauptmatratze und der Fußmatratze + 20 cm.

Wenn das Bett bereits montiert ist, senken Sie es ab, bis es auf dem Wagen (RotoBedTrolley) ruht®. Die Kopfteile können dann entfernt werden. Montieren Sie nun die Verlängerungsstücke, sowohl am Boxspring als auch am Rahmen, bevor Sie die Kopfteile wieder zusammenbauen. (Siehe Fotos unten).



Verlängerungsstück für den Rahmen + 10 cm.
Für die Verlängerung der Hauptmatratze **oder**
der Fußmatratze.



Verlängerungsstück für den Rahmen + 20 cm.
Für die Verlängerung der Hauptmatratze **und**
der Fußmatratze.



Forlængerdel nach liggefladen + 10 cm.
(fodmadrasen)



Teil für den liegenden Teil der Liegescheibe
+ 10 cm. (hovedmadrasen)

Wichtig! Achten Sie beim Ausfahren der Hauptmatratze auf die Betthöhe. Wenn die Betthöhe ganz nach unten getrieben wird, stößt der Bettrahmen der Hauptmatratze gegen den Boden. Wenn das Bett in diesem Zusammenhang beschädigt ist, ist es nicht von der Garantie abgedeckt. Um Schäden am Bettrahmen zu vermeiden, muss die Betthöhe so eingestellt werden, dass zwischen Bettrahmen und Boden mindestens 5 cm Abstand besteht.