



Montage der RotoBed® Underbed Light

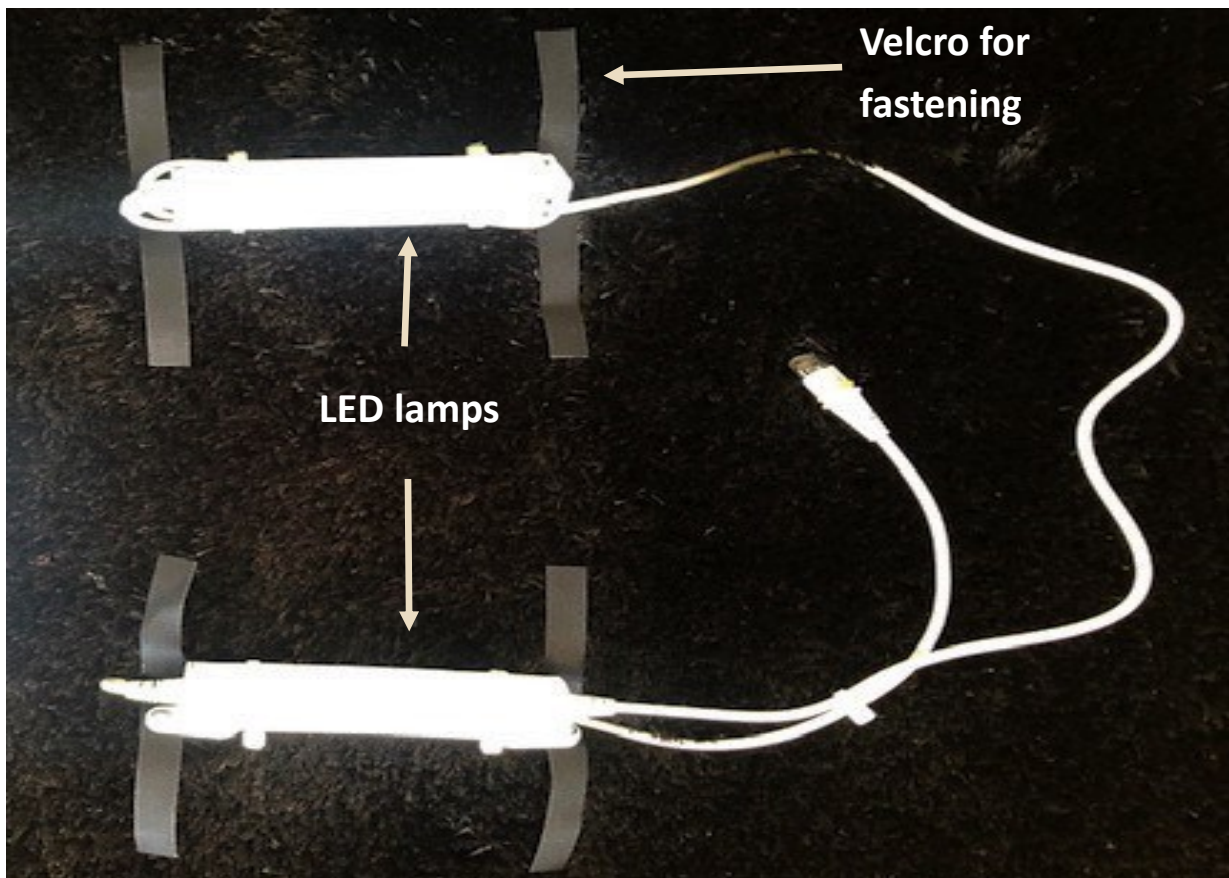


Entfernen Sie zunächst die Matratze. Bringen Sie das Bett in die Ausgangsposition und stellen Sie das Beinteil so hoch wie möglich ein. Nun können Sie die Unterbettleuchte montieren.

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Anschlusskastens:


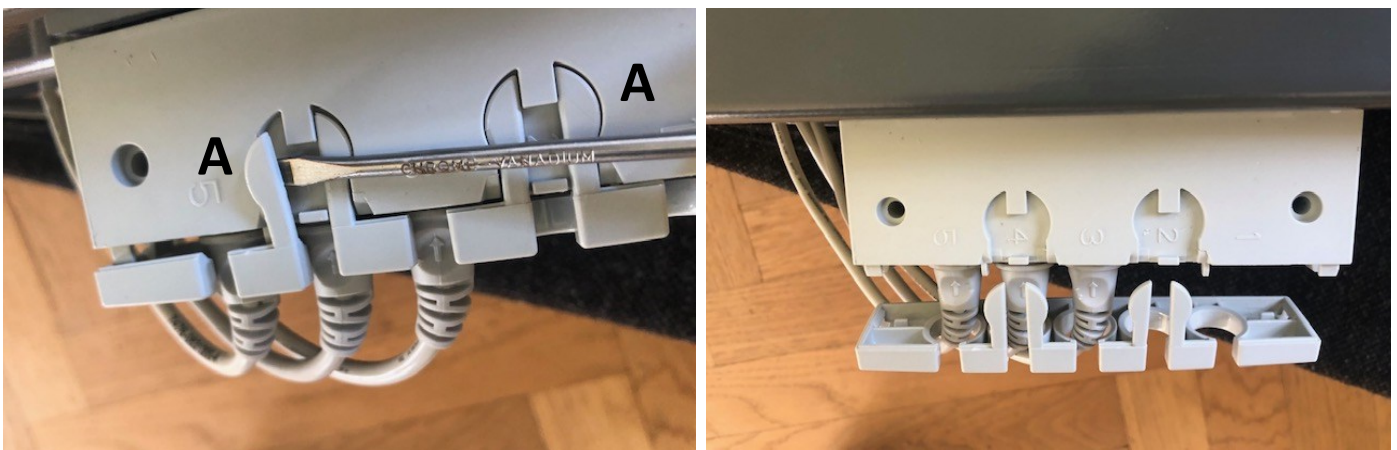


1.a) Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher oder ein ähnliches Werkzeug. Hebeln Sie die vier Stifte (A) vorsichtig an und drücken Sie sie weg. Dadurch lässt sich die Abdeckung des Signalkastens abnehmen. Der Signalkasten ist nun bereit für den Anschluss des neuen Kabels von der LED-Lampe.

2. Montage der LED-Lampen:

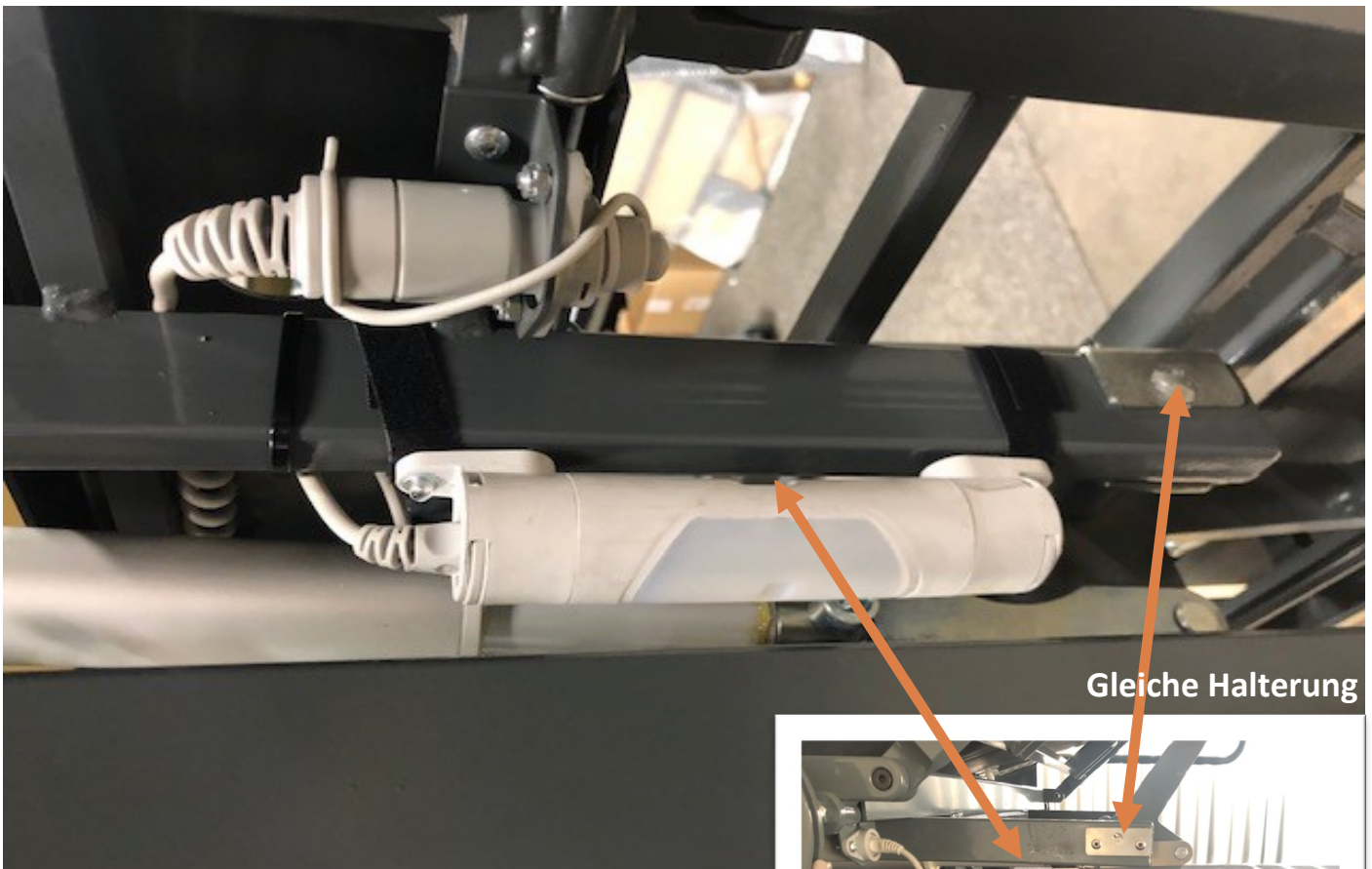

2.a) Befestigen Sie die LED-Lampen mithilfe der Klettstreifen am Bettgestell unterhalb des Beinteils an beiden Seiten des Bettes.

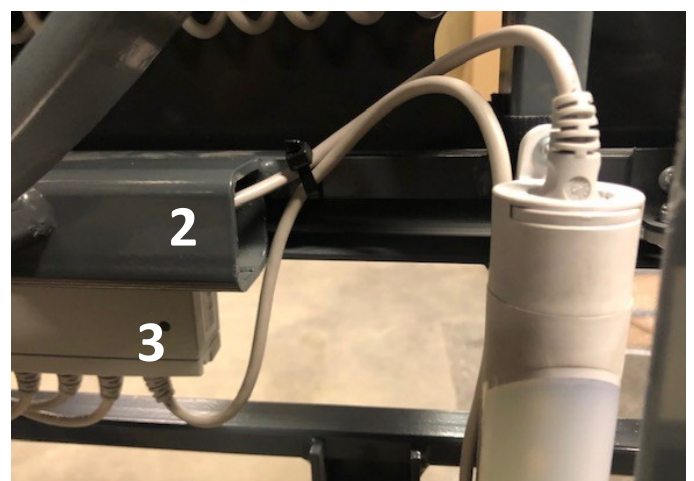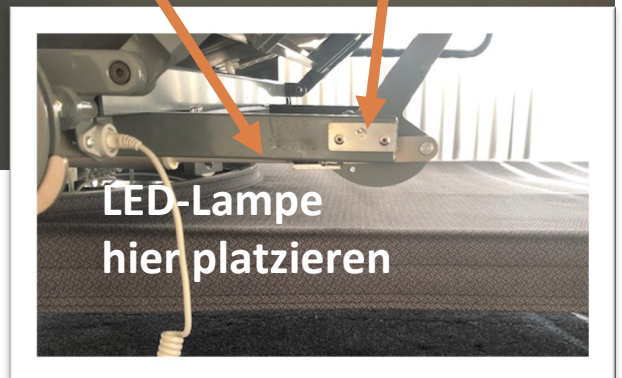

2.b) Nehmen Sie das lange Kabel (1), das mit einer der LED-Lampen verbunden ist, und führen Sie es in das Rohr (2) ein. Verbinden Sie es anschließend mit der anderen LED-Lampe. Das kurze Kabel der LED-Lampe Nr. 2 muss in den Signalkasten (3) gesteckt werden.

RotoBed®