


Montage des RotoBed® Nachttisches


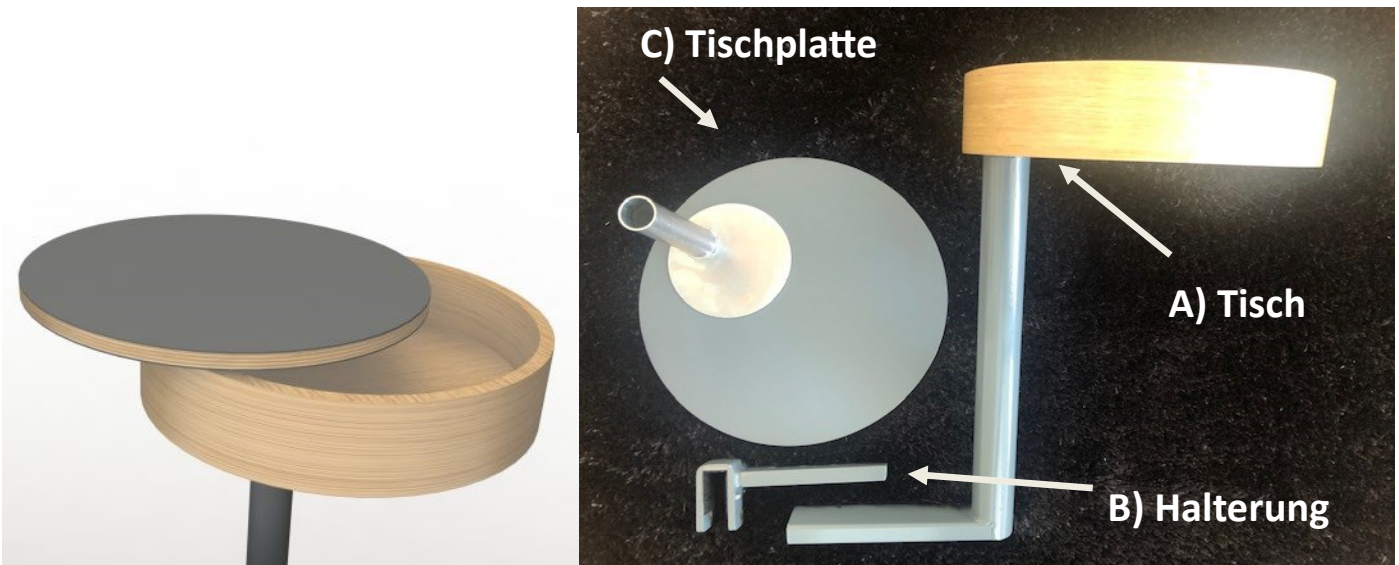


1.


Fahren Sie das Bett in die Ausstiegsposition. Bringen Sie nun das Beinteil in die höchstmögliche Positionseinstellung.

2.1 Wenn das Bett über Holzseitensicherungen verfügt: Schieben Sie die Halterung (B) in das untere 4-Kantrohr der Tischbefestigung (A) und lassen Sie 2 Bohrungen sichtbar. Ziehen Sie die 2 Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest.



2.2 Wenn das Bett über Seitensicherungen aus Metall verfügt: Schieben Sie die Halterung (B) ganz bis zum Anschlag in das 4-Kantrohr der Tischbefestigung (A). Ziehen Sie die 2 Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest.

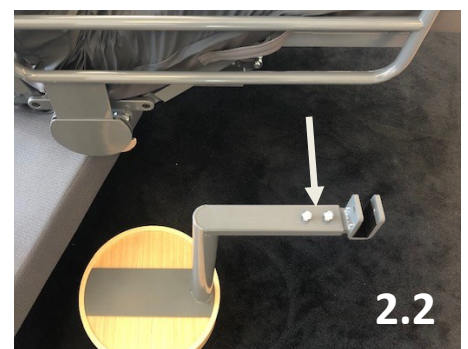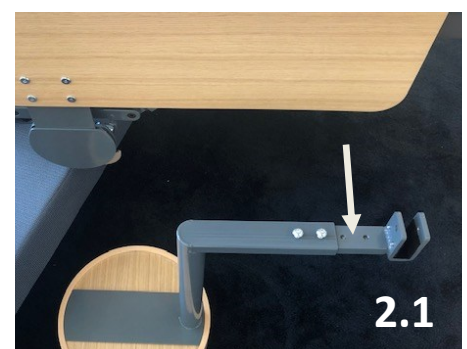


RotoBed®

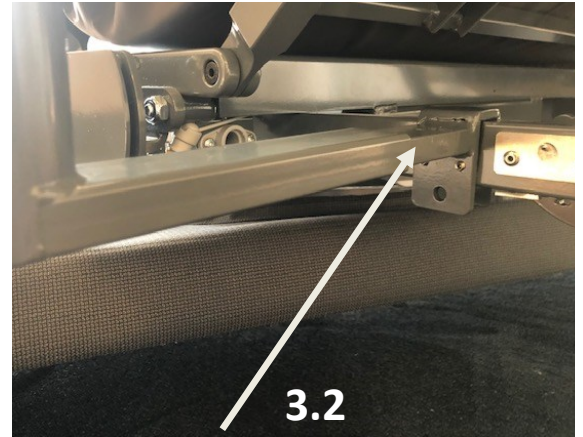

3. Legen Sie die Halterung (B) unter das Beinteil und über den Bettrahmen mit der Öffnung horizontal (3.1). Drehen Sie dann den Bügel mit der Öffnung nach unten und setzen Sie ihn flach aufliegend auf den Bettrahmen (3.2).

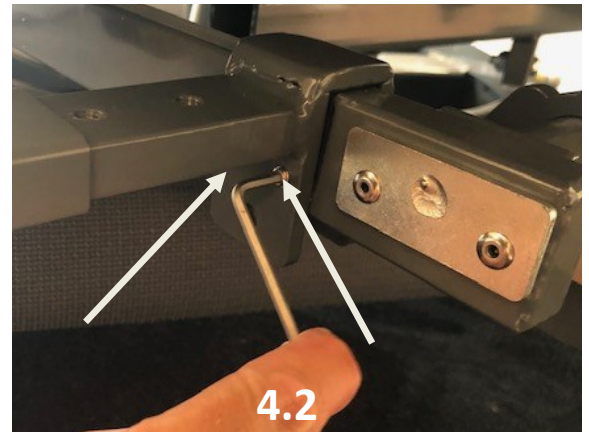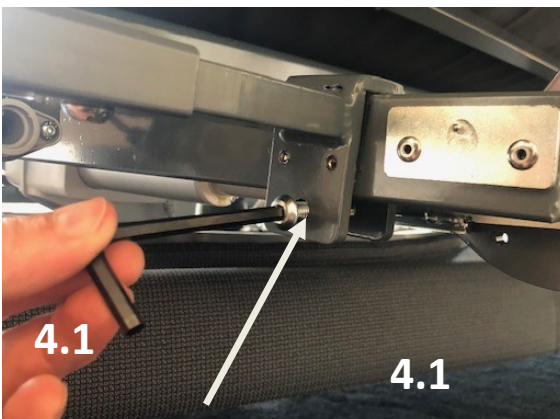

4. Ziehen Sie die große Schrauben (4.1) an, achten Sie darauf, dass der Tisch stabil und senkrecht steht (4.2). Ziehen Sie anschließend die 2 kleinen Schrauben als weitere Sicherungen fest an.

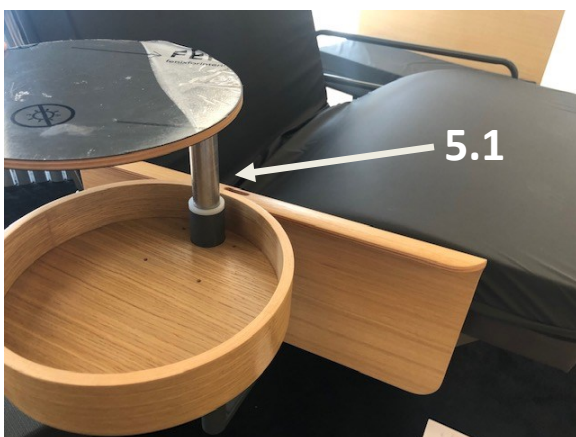

5. Setzen Sie die Tischplatte (C) in den Tisch ein (5.1) und entfernen Sie die Schutzfolie (5.2). Der Tisch ist nun einsatzbereit.

Achtung!

Hat Ihr Bett ein Bettgitter (Seitensicherungen) aus Holz?

RotoBed® ist so programmiert, dass es in eine schräge Ausstiegsposition fährt.

Wenn Sie dies zugunsten eines rechtwinkligen Ausstiegs ändern wollen, beachten Sie bitte Folgendes

Wenn Ihr Bett im mittleren Bereich Seitensicherungen aus Holz hat, kann der Nachttisch NICHT auf der gleichen Seite montiert werden, in die sich das Bett dreht.

Andernfalls kollidiert der Tisch mit dem Kopfteil (siehe Foto unten).

Die Alternativen sind:

A. Montieren Sie den Nachttisch auf der anderen Seite des Bettes.

B. Entfernen Sie das Bettgitter auf dieser Seite. Jetzt können Sie den Tisch näher am Bett montieren (folgen Sie Anweisung 2.2 auf Seite 1)

Achtung!

Der Tisch kollidiert mit dem Kopfteil, wenn sich das Bett in eine rechtwinklige Ausstiegsposition fährt.



RotoBed®