

Kurzanleitung für RotoBed® Home



Einsteigen: Setzen Sie sich so nah wie möglich an den Rücken. Halten Sie die Taste **Liegeposition** gedrückt, bis das Bett horizontal gedreht ist.




Aussteigen: Drücken Sie die Taste **Sitz-position**, bis das Bett in der Ausgangs-position stoppt. Um den Ausgang zu erleichtern, können Sie mit der Fernbedienung die Rückenlehne nach vorne schieben.



Standard ist einen schrägen Ausgang, um den Übergang zu einem Rollstuhl oder Rollator zu erleichtern. Wenn Sie einen senkrechten Ausgang wünschen, lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Fernbedienung

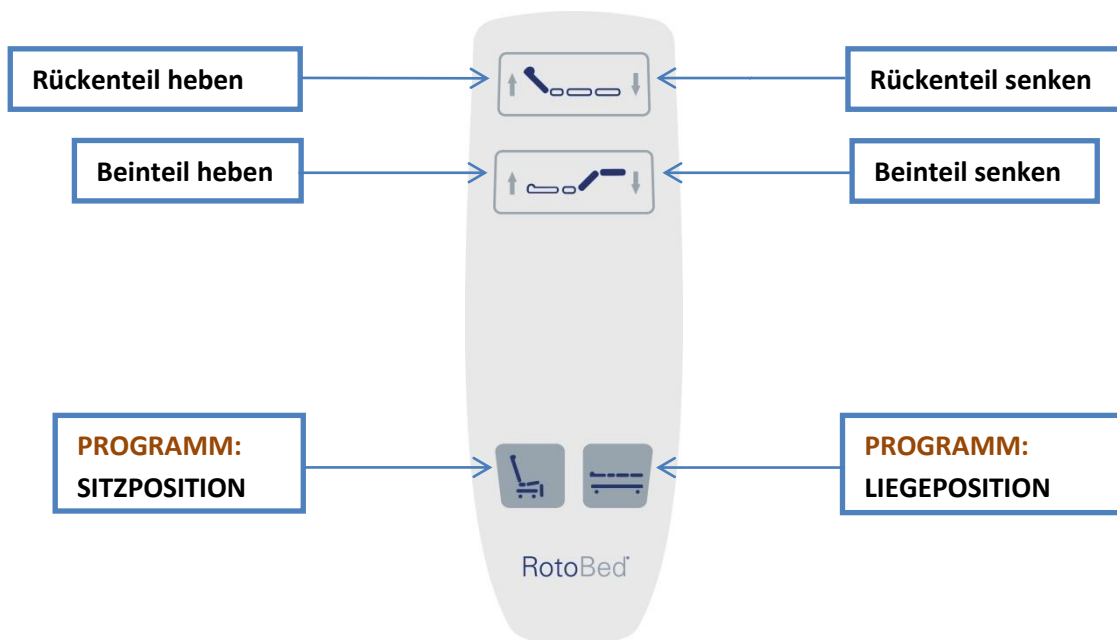

Jede durch eine Tastenbetätigung bewirkte Bewegung stoppt beim Loslassen der jeweiligen Taste. Auf der Fernbedienung darf jeweils nur eine Taste betätigt werden. Gleichzeitiges Drücken von zwei Tasten kann zu einer Umprogrammierung führen, wie dies unten beschrieben ist. Ein RotoBed®Home kann, nach wahl, entweder nach rechts oder nach links drehen. Die Fernbedienung kann an beiden Seiten des Bettes angeschlossen werden.